

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN	MENGHIDUPKAN MESIN IFS		
	Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2618/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Menghidupkan mesin untuk suatu prosedur operasi Lasik.		
Tujuan	Untuk tindakan Lasik.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1631/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Layanan Premium Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: Mesin IFS. Waktu : Persiapan tindakan. Petugas : Perawat optometris. Tempat : Lantai 2 ruang tindakan 2. Pelaksanaan : 1. Pasang kunci dan gerakkan ke kanan searah jarum jam. 2. Tunggu warming up mesin sampai ready (+ 45 menit). 3. Input identitas pasien. 4. Klik proses untuk cek energi. 5. Mesin siap untuk digunakan.		
Instalasi Terkait	Instalasi Pelayanan Premium.		