



 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	MENGHIDUPKAN MESIN IPL		
	Nomor Dokumen : 2631/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Menghidupkan mesin untuk suatu prosedur Inten Pulse Light		
Tujuan	Untuk tindakan IPL		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1631/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Layanan Premium Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat: Lumenis M22 (IPL)</p> <p>Waktu : Ketika terjadi persiapan tindakan</p> <p>Petugas : Perawat</p> <p>Tempat : Lantai 5 ruang <i>Treatment Dry Eye</i></p> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan ON (di belakang mesin). 2. Tekan tombol Hijau (posisi ON). 3. Masukkan <i>Pasword</i> 1234. 4. Tekan OK. 5. Buka kunci handel untuk memasukan prove sampai "klik". 6. Pasang intens pada handel. 7. Tutup kunci handel. 8. Pilih mode IPL (590). 9. Pilih by <i>name</i>. 10. Pilih <i>Pulse</i> dan <i>Ready</i>. 11. Gambar kotak biru berfungsi sebagai "INTEN " pilih gambar ini. 12. Gambar bintang berfungsi sebagai pendingin. 13. Perhatikan jenis kulit pasien untuk menentukan <i>fluence</i>, minimal 12 <i>fluence</i>. 14. IPL per mata di berikan 5x dengan posisi di bawah kelopak mata dimulai dari Nasal ke temporal dengan posisi jarak menyesuaikan. 15. Matikan INTEN M dengan pilih <i>shutdown</i>. 16. Matikan tombol hijau di bagian depan. 		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	MENGHIDUPKAN MESIN IPL		
	Nomor Dokumen : 2631/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	17. Matikan tombol ON OFF di bagian mesin belakang. 18. Cek air (<i>aquabidest</i>) di belakang mesin setiap selesai tindakan.		
Instalasi Terkait	Instalasi Pelayanan premium		