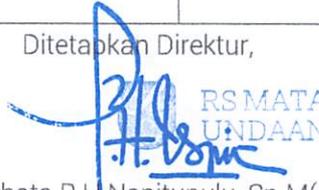


 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	PENGUNAAN CENTRIFUGE		
	Nomor Dokumen : 2515/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Penggunaan centrifuge adalah suatu tata cara penggunaan alat untuk memutar spesimen darah untuk diambil serum atau spesimen urine untuk diambil endapan urine (sedimen).		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk penggunaan centrifuge.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentrifuge; 2. Tabung vakum. <p>Waktu: Ketika penggunaan centrifuge.</p> <p>Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan).</p> <p>Tempat : Laboratorium.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan steker ke dalam stop kontak; 2. Membuka tutup alat centrifuge; 3. Masukkan tabung berisi sampel darah atau urine, putar dengan kecepatan dan waktu sesuai dengan yang diinginkan ke dalam sumuran tabung pada alat dengan posisi berhadapan yang seimbang; 4. Jalankan centrifuge dengan adjust timer dan rpm sesuai dengan bahan spesimen dan indikasi pemeriksaan spesimen; 5. Setelah centrifuge berhenti dengan sempurna, buka tutupnya dan ambil tabung spesimen; 6. Cabut steker pada stop kontak setelah selesai penggunaan. 		
Instalasi Terkait	Laboratorium.		