

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PENERIMAAN INSTRUMEN BEKAS PAKAI DARI INSTALASI PENGGUNA KE SENTRA STERILISASI</b>		
	Nomor Dokumen : 1904/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Proses penerimaan instrumen yang telah digunakan di instalasi pengguna ke SS agar dapat disterilkan dan digunakan kembali untuk pelayanan pasien.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instrumen yang telah digunakan dapat disterilkan sesuai standar.</li><li>2. Instrumen dapat tercatat/terinventaris.</li><li>3. Pelaksanaan penerimaan instrumen dari instalasi harus diperhatikan keselamatan dan keamanan petugas.</li></ol>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat: Buku Penerimaan &amp; Pendistribusian SS</p> <p>Waktu: Ketika melakukan penerimaan instrumen bekas pakai dari Instalasi di Luar Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi</p> <p>Petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Sentra Sterilisasi;</li><li>2. Petugas Instalasi Rawat Inap;</li><li>3. Petugas Instalasi Rawat Jalan;</li><li>4. Petugas Instalasi Gawat Darurat;</li><li>5. Petugas Instalasi Layanan Premium.</li></ol> <p>Tempat : Sentra Sterilisasi</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuci tangan.</li><li>2. Instrumen bekas pakai diserahkan oleh petugas instalasi pengguna dan diterima oleh petugas SS di ruang pencucian alat kotor.</li><li>3. Kondisi instrumen diperiksa oleh petugas SS kelengkapan dan kondisi instrumen disaksikan petugas instalasi pengguna.</li><li>4. Serah terima instrumen dicatat pada bagan permintaan sterilisasi oleh petugas instalasi pengguna sesuai dengan jenis dan jumlah instrumen.</li></ol>		

fk

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PENERIMAAN INSTRUMEN BEKAS PAKAI DARI INSTALASI PENGGUNA KE SENTRA STERILISASI</b>		
	Nomor Dokumen : 1904/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	5. Jika sudah sesuai petugas instalasi pengguna dan petugas SS memberikan tanda tangan, nama jelas dan tanggal penerimaan pada form permintaan sterilisasi. 6. Cuci tangan.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Instalasi Layanan Premium 6. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		

flc