
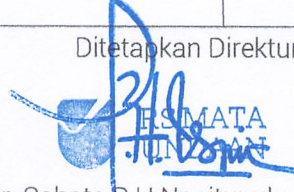

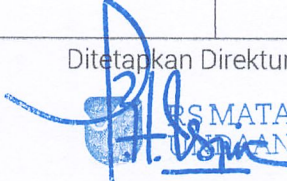


ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PEMELIHARAAN ELECTRO SURGERY UNIT		
	Nomor Dokumen : 2187/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Prosedur tetap pengoprasian <i>Electro Surgery</i> Unit adalah standar baku, mengenai langkah-langkah pengopersaian/penggunaan alat <i>Electro Surgery</i> Unit.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pengoperasian alat dilakukan secara benar.2. Agar didapatkan hasil tindakan yang baik dan aman.3. Agar pasien dan operator terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahan pengoperasian.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1860/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pengelolaan Alat Medis.		
Prosedur	Persiapan Alat : <ol style="list-style-type: none">1. Seperangkat alat <i>Electro Surgery</i> Unit Waktu : Ketika ada permintaan operasi minor dan mayor Petugas : <ol style="list-style-type: none">1. Perawat Tempat : Penunjang Medis, Rawat Jalan, Rawat Inap, Layanan Premium Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan harian:<ol style="list-style-type: none">a. Jaga kebersihan alat.b. Usahakan agar sebelum dan sesudah pemakaian alat <i>Electro Surgery unit</i> agar diperiksa semua bagian-bagian, mengingat alat ini dikendalikan secara elektronik.c. Kondisikan alat pada posisi off setelah pemakaian.2. Pemeliharaan bulanan:<ol style="list-style-type: none">a. Bersihkan seluruh bagian alat.b. Periksa fungsi tombol, konektor dan indicator.c. Periksa kondisi fisik dan fungsi seluruh electrode pada berbagai kondisi pengaturan dan penggunaan.d. Periksa semua kondisi fisik alat.3. Pemeliharaan tahunan:<ol style="list-style-type: none">a. Periksa system catu daya.b. Periksa kondisi fisik dan fungsi seluruh electrode pada berbagai kondisi pengaturan dan penggunaan.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PEMELIHARAAN ELECTRO SURGERY UNIT		
	Nomor Dokumen : 2187/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
	c. Lakukan pengukuran kabel dan arus bocor pada kabel penghubung dan <i>body</i> . d. Lakukan pengukuran tahanan kabel pbumian. e. Lakukan uji kinerja alat. Evaluasi hasil pemeliharaan bulanan		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		