
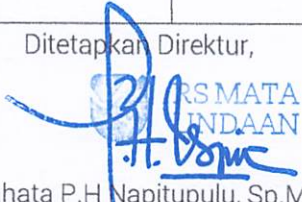


ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	PEMERIKSAAN PEWARNAAN GRAM		
	Nomor Dokumen : 2397/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemeriksaan pewarnaan gram adalah pewarnaan kuman. Gram positif akan menyerap warna gentian violet dan gram negatif akan menyerap zat warna safranin.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pemeriksaan pewarnaan gram.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Objek glass 2. Spiritus 3. Mikroskop 4. Jembatan pewarna 5. Reagen a. Carbol gentian violet b. Lugol c. Aceton Alkohol d. Safranin / Carbol fuchsin Metode : Pewarnaan Gram Bahan: Sekret dan Pus Waktu: Ketika Pelayanan Laboratorium Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan) Tempat : Laboratorium Pelaksanaan Cara Kerja : 1. Buat sediaan dan fiksasi 2. Letakan sediaan kuman di atas jembatan pewarna dan genangi dengan carbol gentian violet selama 1 menit 3. Cuci dengan air kran 4. Genangi dengan aceton alkohol 30 detik		

