
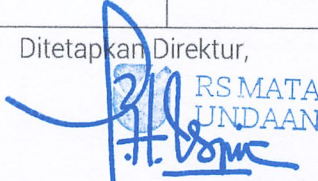


ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMERIKSAAN SPECULAR MICROSCOPE</b>		
	Nomor Dokumen : 2278/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Specular microscope adalah teknik fotografi noninvasi yang memfasilitasi diagnosis endotheliopati kornea yang cepat dan akurat.		
Tujuan	Untuk menghitung jumlah sel endotel pada kornea dan ketebalan kornea.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat specular microscope;</li><li>2. Kertas thermal;</li><li>3. Alkohol swab.</li></ol> <p>Waktu: Ketika diperlukan screening menghitung jumlah sel endotel kornea</p> <p>Petugas: Perawat IPDT</p> <p>Tempat: IPDT</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyalakan <i>on – off</i> alat</li><li>2. Panggil pasien sesuai dengan identitasnya (nama, alamat, tanggal lahir) pastikan ada surat rujukan dokter dan kuitansi resmi dari kasir</li><li>3. Ucapkan salam, senyum, sapa pada pasien</li><li>4. Berikan informasi tentang pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan kepada pasien</li><li>5. Posisikan pasien pada <i>chin rest</i> dan <i>head rest</i></li><li>6. Geser stick posisikan scan pada kornea mata pasien</li><li>7. Klik tombol <i>analysis</i></li><li>8. Klik tombol <i>result</i></li><li>9. Periksa mata yang lain</li><li>10. Klik tombol <i>analysis</i></li><li>11. Klik tombol <i>result</i></li><li>12. Print</li></ol>		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>	<b>PEMERIKSAAN SPECULAR MICROSCOPE</b>		
	Nomor Dokumen : 2278/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503			
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	13. Beritahukan pada pasien pemeriksaan telah selesai Bila angka tidak keluar, maka : 1. Klik manual <i>analysis</i> 2. Klik <i>result</i> 3. Klik detail 4. Klik <i>select all</i> , klik OK 5. Klik manual <i>analysis</i> 6. Klik gambar yang masih baik (minimal 100 x), klik OK 7. Print 8. Matikan alat (tekan tombol <i>OFF</i> ) 9. Matikan UPS		
Instalasi Terkait	Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		