
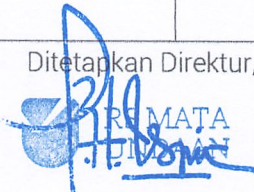
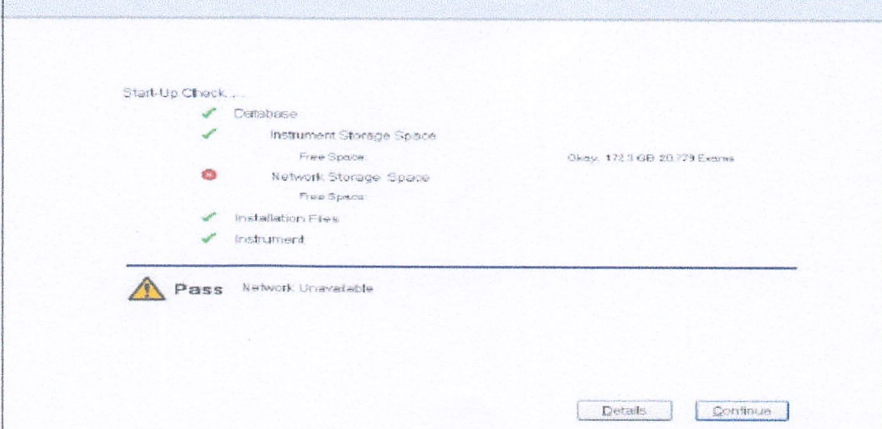
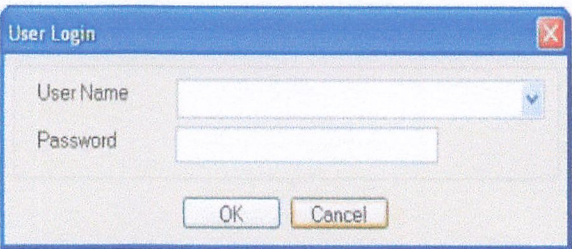


ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY		
	Nomor Dokumen : 2201/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/5
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Optical Coherence Tomography adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk mendapatkan gambar cross-sectional dari segmen anterior dan posterior mata.		
Tujuan	Untuk menghindari kesalahan operasional Penggunaan alat OCT yang dapat Membahayakan pasien Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1860/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pengelolaan Alat Medis.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seperangkat alat Optical Coherence Tomography2. Rekam medis pasien <p>Waktu : Ketika ada permintaan diagnosa Optical Coherence Tomography</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawat <p>Tempat : Penunjang Medis</p> <p>Pelaksanaan <u>Cara menghidupkan CIRRUS HD-OCT:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Tekan <i>power switch</i> (no. 1) yang terletak di bawah layar monitor CirrusHD-OCT 		


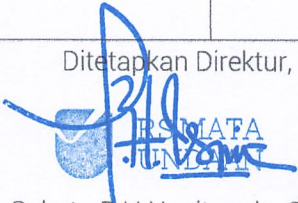
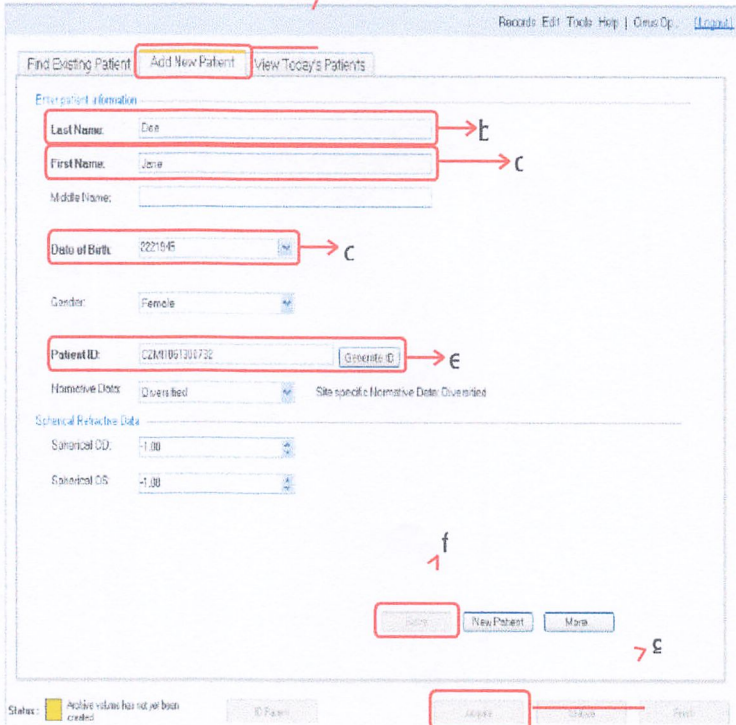
Gambar 1 Power Switch Cirrus HD-OCT

ORIGINAL

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	PENGUNAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY		
Standar Prosedur Operasional	Nomor Dokumen : 2201/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/5
Prosedur	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
	<p>2. Tunggu beberapa saat hingga muncul START-UP CHECK (gambar no. 2) pada layar, kemudian klik <input type="button" value="Continue"/> untuk menuju ke User Login. (catatan: apabila dari keempat tanda ✓ ada yang mejadi "x" atau status alat tidak "PASS", harap menghubungi Service Engineer Carl ZEISS)</p>  <p>Gambar 2 <i>Start-Up Check</i> saat Cirrus HD-OCT dinyalakan.</p> <p>3. Muncul tampilan User Login (gambar no. 3). Klik tanda panah yang ada di box User Name kemudian pilih Cirrus Operator, tanpa Password, kemudian klik OK</p>  <p>Gambar 3 Tampilan <i>User Login</i></p>		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY		
	Nomor Dokumen : 2201/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 3/5
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	4. Tunggu hingga keluar tampilan MAIN MENU (gambar no. 4)		
	 <p>The screenshot shows a software interface with a menu bar (Records, Edit, Tools, Help) and a user name (Gina Operator). Below the menu are three tabs: 'Find Existing Patient', 'Add New Patient', and 'View Today's Patients'. The 'Find Existing Patient' tab is active, showing search fields for 'Last Name' and 'Patient ID', a 'Search' button, and an 'Advanced Search' link. Below the search fields is a 'Results' section with a table header containing 'Last Name', 'First Name', 'Birth Date', and 'Patient ID'. At the bottom, there is a 'Status' indicator (yellow square) and a 'Newick Usability' label, along with several buttons: 'E-Patient', 'Status', 'Assign', and 'Home'.</p>		
	Gambar 4 Tampilan <i>Main Menu</i>		

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY		
	Nomor Dokumen : 2201/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 4/5
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<u>Cara Pengoperasian Cirrus HD-OCT:</u> 1. Memasukkan data pasien baru 		


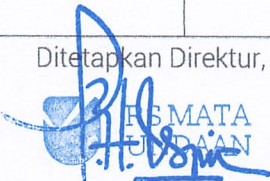
Gambar 5 Data Pasien Baru

Langkah – langkah pengisian data pasien, dan pengambilan data atau *Acquire*

adalah sebagai berikut :

- a. Klik **Add New Patient** untuk pengisian data pasien baru
- b. **Last Name** : lakukan pengisian untuk nama terakhir pasien
- c. **First Name** : lakukan pengisian untuk nama awal pasien
- d. **Date of Birth** : pengisian tanggal lahir pasien dilakukan dengan format MM-DD- YYYY
***Gender** : pilih jenis kelamin pasien

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY		
	Nomor Dokumen : 2201/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 5/5
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	e. Patient ID : diisi sesuai dengan nomor ID rumah sakit/klinik *Normative Data : pilih Asian Normative Data: <input type="text" value="Diversified"/> Site specific Normative Data: Diversified Spherical Refractive Data: <input type="text" value="Diversified"/> Spherical OD: <input type="text" value="Asian"/> Spherical OS: <input type="text" value=""/> Gambar 6 Normative Data		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Instalasi Penunjang Medis		