
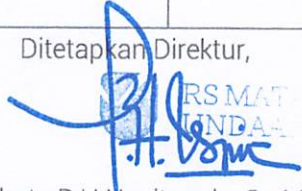


ORIGINAL

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PENGOPERASIAN ALAT X-RAY LISTEM		
	Nomor Dokumen : 2235/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Adalah prosedur penggunaan peralatan x ray konvensional Listem.		
Tujuan	Untuk memudahkan bagi petugas radiologi dalam mengoperasikan peralatan di instalasi radiologi sehingga tercapai pelayanan yang optimal		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1946/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat: X-Ray listem</p> <p>Waktu : Ketika penggunaan alat x-ray.</p> <p>Petugas: Radiografer</p> <p>Tempat: Ruang Radiologi</p> <p>Pelaksanaan Cara Pengoprasian Alat X – Ray Listem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol ON pada UPS 2. Lalu tekan tombol power "ON" pada control table, "Initializing..." akan muncul pada display. Selama proses tersebut system akan memeriksa data-data yang ada, seperti data operasi, lingkungan, data kalibrasi. Proses tersebut membutuhkan waktu kira-kira 5 detik. 3. Atur kV dan mAs dengan menekan tombol pemilihan UP/DOWN untuk kV dan mAs, setelah itu tentukan <i>body size</i> sesuai keadaan pasien, tentukan juga untuk bagian tubuh yang lebih detail (seperti organ-organ tubuh). 4. Setelah semua parameter sesuai dengan gambar yang akan diambil tekan tombol SET untuk menyimpan factor-faktor expose yang telah ditentukan. 5. Tekan tombol expose sekali untuk preparation, kemudian tekan sekali lagi untuk melakukan expose. Jika terjadi kesalahan, maka kode error akan muncul di display kV 6. Untuk mematikan cukup tekan tombol "OFF" di control table nya, lalu tekan tombol OFF pada UPS 		
Instalasi Terkait	Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi		