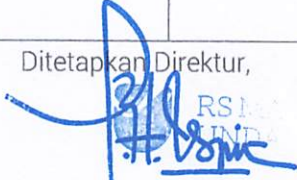
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PENGOPERASIAN COMPUTERIZED RADIOGRAPHY (CR) FUJI FILM		
	Nomor Dokumen : 2237/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Adalah prosedur penggunaan peralatan <i>computerized radiography</i> merek Fuji Film, mulai menghidupkan sampai mematikan alat.		
Tujuan	Untuk memudahkan bagi petugas radiologi dalam mengoperasikan peralatan di radiologi sehingga tercapai pelayanan yang optimal.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1946/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi.		
Prosedur	Persiapan Alat: <i>computerized radiography</i> Waktu : Ketika pengoperasian <i>computerized radiography</i> (CR) Petugas: Radiografer Tempat: Ruang Radiologi Pelaksanaan 1. Cara menghidupkan alat CR : a. Tekan tombol on pada UPS b. Lalu tekan power supply di CPU dan di alat reader. c. Tunggu beberapa saat sampai dengan computer dan reader siap/ ready. d. Lalu klik di menu administrator, klik login, dan CR siap di gunakan. e. Hidupkan power supply dry printer dan tunggu beberapa saat sampai printer siap/ ready. 2. Cara mematikan alat CR : a. Posisikan menu CR pada posisi awal. b. Klik ikon shutdown pada window FCR. c. Lalu pilih Ok, setelah muncul pilihan Shutdown the PC d. Klik OK pada dialog konfirmasi. e. Pada dry printer klik window shut down kemudian klik OK pada dialog konfirmasi.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi. 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana.		