



RSMATA
UNDAAN

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619,
5343806 Fax: 031-5317503

PENGOPERASIAN ELECTROCARDIOGRAPH

ORIGINAL

Nomor Dokumen :
2182/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 002

Halaman : 1/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
21 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,



dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

Pengertian

Prosedur tetap pengoperasian Electrocardiograph adalah standar baku, mengenai langkah-langkah pengoperasian/ penggunaan alat Electrocardiograph.

Tujuan

1. Agar pengoperasian alat dilakukan secara benar.
2. Agar didapatkan hasil tindakan yang baik dan aman.
3. Agar pasien dan operator terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahan pengoperasian.

Kebijakan

Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor:
1860/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pengelolaan Alat Medis.

Prosedur

Persiapan

Alat :

1. Seperangkat alat Electrocardiograph
2. Rekam medis pasien

Waktu : Ketika ada permintaan diagnosa Electrocardiograph

Petugas :

1. Perawat

Tempat : Rawat Inap, IGD, Bedah Operasi

Pelaksanaan


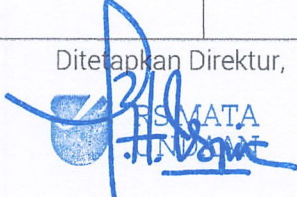
A. PRASYARAT

1. SDM terlatih dan siap.
2. Catu daya sesuai kebutuhan Alat.
3. Kontak listrik terhubung dengan terminal pembumian.
4. Alat laik pakai.
5. Aksesoris lengkap dan baik.
6. Bahan operasional tersedia.

B. PERSIAPAN

1. Lepaskan penutup debu.
2. Siapkan aksesoris, *patient cable, strap electrode, chest electrode*, Jel.
3. Pasang patient kabl.
4. Cek kertas rekam, ganti kertas jika habis.

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGOPERASIAN ELECTROCARDIOGRAPH		
	Nomor Dokumen : 2182/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	5. Hubungkan alat ke terminal pembumian. A. PEMANASAN 1. Hubungkan alat ke catu daya. 2. Cek baterai untuk penggunaan menggunakan catu daya DC. 3. Hidupkan alat dengan menekan tombol <i>On/Off</i> ke posisi ON. 4. Lakukan pemanasan seceukupnya. B. PELAKSANAAN 1. Perhatikan protap pelayanan. 2. Atur posisi pasien. 3. Pasang <i>strap electrode, chest electrode</i> pada <i>patient cable</i> . 4. Oleskan jel pada <i>strap electrode, chest electrode</i> . 5. Pasang <i>strap electrode, chest electrode</i> pada pasien. 6. Pilih program (auto / manual). 7. Lakukan pemeriksaan. C. PENGEMASAN / PENYIMPANAN 1. Matikan alat dengan menekan tombol <i>ON/OFF</i> ke posisi OFF. 2. Lepaskan alat dari Catu daya. 3. Lepaskan <i>strap electrode, chest electrode</i> pada pasien. 4. Lepaskan <i>strap electrode, chest electrode</i> pada <i>patient cable</i> . 5. Bersihkan <i>patient cable, strap electrode, chest electrode</i> . 6. Simpan alat dan aksesoris pada tempatnya. 7. Catat beban kerja alat.		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 4. Rawat Inap		