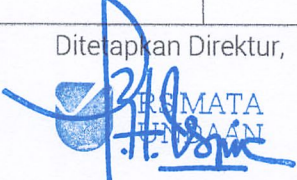

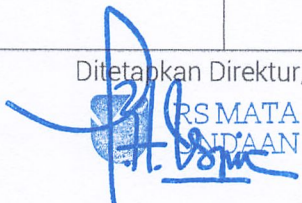
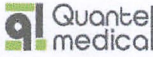











ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGOPERASIAN ALAT USG MATA B-SCAN		
	Nomor Dokumen : 2186/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Prosedur tetap pengoperasian B-SCAN adalah standar baku, mengenai langkah-langkah pengopersaian/penggunaan alat B-SCAN.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pengoperasian alat dilakukan secara benar.2. Agar didapatkan hasil tindakan yang baik dan aman.3. Agar pasien dan operator terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahan pengoperasian.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1860/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pengelolaan Alat Medis.		
Prosedur	Persiapan Alat : <ol style="list-style-type: none">1. Seperangkat alat B-SCAN2. Rekam medis pasien Waktu : Ketika ada permintaan diagnosa B-SCAN Petugas : <ol style="list-style-type: none">1. Perawat Tempat : Penunjang Diagnostik dan Terapi		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGOPERASIAN ALAT USG MATA B-SCAN		
	Nomor Dokumen : 2186/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
	Pelaksanaan		
	  SOP AVISO		
	<ol style="list-style-type: none">1. Hidupkan switch unit AVISO dan kemudian PC, Tunggu software AVISO otomatis berjalan.2. Pilih nama Physician kemudian Pilih Patient  .3. Isi nama Pasien, ID Number, dan pilih Gender.4. Jika melakukan Biometri, Masukkan nilai K1 dan K2 kemudian Save.5. Pilih Scan  untuk melakukan pemeriksaan.6.  Untuk memilih Biometri, pilih OD atau OS. ketika siap injak footswitch atau klik .7. Tunggu hingga hasil biometri mencapai 10 pengukuran. (S.D maksimal 0.04)8. Klik  untuk melihat hasil IOL dari pengukuran kemudian Save.9.  Untuk memilih USG / B-Scan, pilih OD atau OS ketika siap injak footswitch atau klik .10. Ketika selesai Save. Jika di butuhkan klik Tool.11. Pilih gambar yang mau di print. Klik  untuk Print hasil pemeriksaan. <p>Untuk mematikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setelah selesai Save hasil. Close Program AVISO.2. Cari Start Menu dan pilih Shut Down dan tunggu hingga PC mati.3. Setelah PC mati, Matikan Unit AVISO. <p style="text-align: center;">XL_AVO_US_Car 2018</p>		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana2. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi		