





ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	STERILISASI MENGGUNAKAN MESIN "DGM"		
	Nomor Dokumen : 1913/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Proses penghancuran semua mikroorganisme termasuk spora pada alat/bahan medis dengan media uap panas yang bertekanan.		
Tujuan	Mensterilkan/mensucihamakan instrumen, linen dan bahan medis yang tahan terhadap panas bertekanan, agar siap dan tidak rusak.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. APD (Sarung tangan anti panas);2. Bahan yang akan disterilkan (Tahan panas);3. <i>Trolley</i>;4. <i>Loading Cart</i>. <p>Waktu: Ketika mau melakukan proses sterilisasi pada alat/bahan medis tahan panas</p> <p>Petugas: Petugas Sentra Sterilisasi</p> <p>Tempat : Sentra Sterilisasi</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siapkan APD (sarung tangan anti panas).2. Siapkan bahan yang akan disterilkan. Susun secara benar dalam keranjang dan letakkan diatas <i>loading cart</i>/gerobak pemuatan. Tempatkan <i>loading cart</i>/gerobak pemuatan pada <i>trolley</i> dan kunci agar <i>loading</i> tidak bergerak. <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cuci tangan dengan <i>handrub</i>.2. Hidupkan kompresor, buka kran air RO, buka kran air bersih.3. Tekan tombol <i>power on</i> (Tombol Biru) pada mesin.4. Tekan <i>enter</i> pada monitor.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	STERILISASI MENGGUNAKAN MESIN "DGM"		
	Nomor Dokumen : 1913/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5. Pakai APD (sarung tangan anti panas).6. Posisikan <i>trolley</i> tepat di depan pintu mesin.7. Lepaskan pengunci <i>loading cart</i>/gerobak pemuatan dari <i>trolley</i>, dorong <i>loading cart</i>/gerobak pemuatan yang sudah tidak terkunci ke dalam ruang/<i>chamber</i> sterilisasi.8. Lepaskan sarung tangan anti panas cuci tangan dengan <i>handrub</i>.9. Tekan menu "<i>Door</i>" dan tekan menu <i>close</i> untuk menutup pintu <i>chamber</i>.10. Tekan menu "<i>Back</i>" untuk kembali ke menu utama.11. Tekan menu "<i>Program</i>" untuk memilih program sterilisasi, maka pada layar akan menampilkan program <i>select</i>.<ol style="list-style-type: none">a. Tekan P01 <i>Wrapped 134⁰C</i> : jika ingin menyeterilkan instrumen yang dibungkus <i>pouches</i>.b. Tekan P03 <i>Wrapped 121⁰C</i> : Jika ingin menyeterilkan bahan linen/kasa yang dibungkus <i>pouches</i> atau <i>wrapping paper</i>.12. Tekan "<i>Start</i>" untuk memulai proses sterilisasi (jika tekanan P2 sudah mencapai angka 215 kPa).13. Tekan "<i>Yes</i>" ketika muncul pertanyaan "<i>Start the cycle?</i>" pada layar, Tunggu sampai proses sterilisasi selesai.14. Tekan "<i>Reset</i>" jika tampil notifikasi pada layar (menandakan proses sterilisasi selesai).15. Pencet tombol sebelah atas yang ada di belakang mesin untuk membuka pintu mesin bagian belakang, tunggu 5 menit.16. Tekan tombol bagian bawah untuk menutup kembali pintu belakang.17. Tekan menu "<i>Door</i>" pada layar dan pilih "<i>Open</i>" untuk membuka pintu depan.18. Pakai sarung tangan anti panas.19. Keluarkan <i>trolley</i>.20. Biarkan pintu depan mesin tetap terbuka.21. Tekan tombol biru untuk mematikan mesin sterilisasi.22. Matikan kran air bersih, matikan karan air RO, matikan kompresor.		
Instalasi Terkait	Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		