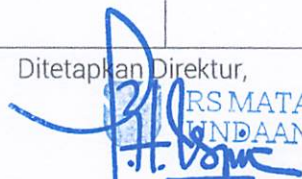

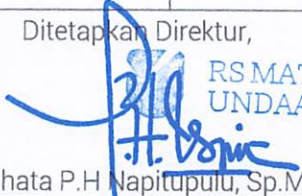
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	SCREENING SPESIMEN LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2240/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Screening spesimen laboratorium adalah memeriksa kelayakan spesimen yang akan diperiksa di laboratorium		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pelacakan/tracking spesimen.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 2. Tabung penampung spesimen <p>Waktu: Ketika pelayanan Laboratorium</p> <p>Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan)</p> <p>Tempat: Laboratorium</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terima spesimen beserta blanko permintaan dari ruangan yang membutuhkan pemeriksaan Laboratorium. 2. Cocokkan identitas pasien dan jenis pemeriksaan pada blanko permintaan. 3. Periksa kelayakan spesimen yang diterima meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tepat identitas b. Tepat volume tabung c. Tepat tabung d. Tidak clotting meliputi : tabung EDTA, Sodium Citrate 3.2%, Sodium Heparin (antikoagulan) tidak ada clotting, e. Tabung tutup merah (tanpa antikoagulan) harus beku (clotting). f. Tidak lisis, lipemik atau ikhterik dengan cara : Spesimen diputar 4000rpm selama 10 menit, periksa spesimen apakah terdapat lisis, lipemik atau ikhterik. 4. Catat spesimen yang diterima apabila tidak layak laporkan kedalam laporan harian. 		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	SCREENING SPESIMEN LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2240/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	5. Lakukan pemeriksaan sesuai permintaan		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Laboratorium		